



# Стропи

для стельового підйомника





## Стропи Guldmann – безліч варіантів

**Використання відповідної стропи має важливе значення для ефективного догляду, а також для забезпечення комфорту та безпеки пацієнта без шкоди для медичного працівника.**

### Переміщення – Лікування – Реабілітація

*Для підйому та переміщення, а також для догляду та реабілітації.*

Стропи для підйому, повороту та переміщення є важливою частиною широкого асортименту підйомно-транспортного обладнання Guldmann. Стропи Guldmann використовуються в багатьох різних завданнях по догляду, і всі вони допомагають досягти більшого комфорту та кращого результату. Пацієнти відчувають переваги від безпечного підйому, позиціонування та повороту в реабілітації, мобілізації та активації, які виконуються безпечно та регулярно.

### Пацієнти бувають різних форм і розмірів

*Так само і всі стропи Guldmann*

Стропи Guldmann розроблені з акцентом на комфорт і простоту використання. Їх можна використовувати як зі стельовими підйомниками, так і з мобільними підйомниками.

Вибір відповідного типу та розміру стропи має великий вплив на якість переміщення кожного пацієнта.


Ось чому стропи Guldmann доступні для дітей і дорослих, бариатричних пацієнтів, а також людей з особливими потребами, у багатьох різних типах, розмірах і матеріалах. У широкому асортименті строп і підйомних аксесуарів ви можете знайти стропу для будь-якого завдання з догляду.

### Від зеленого до синього

*Простий у використанні – простий у розумінні*

Стропи Guldmann ABC створені для легкого використання та розуміння. Стропи позначено червоним **A** (Активні), зеленим **B** (Базові) і синім **C** (Для користувача) кольоровим кодуванням на стропах. **Зелений** колір означає, що це універсальний слінг, який може використовувати більшість пацієнтів. **Червоний** колір вказує на те, що реабілітолог повинен приділити більше уваги оцінці функції організму пацієнта перед використанням. Код **синього** кольору вказує на те, що стропа призначена для спеціального призначення.

Широкий асортимент строп Guldmann розроблено з кольоровими петлями для полегшення роботи з ними. Кольори спрощують комунікацію, у випадку коли більше осіб, які здійснюють догляд, співпрацюють у виконанні завдань з підйому, переміщення або мобілізації.

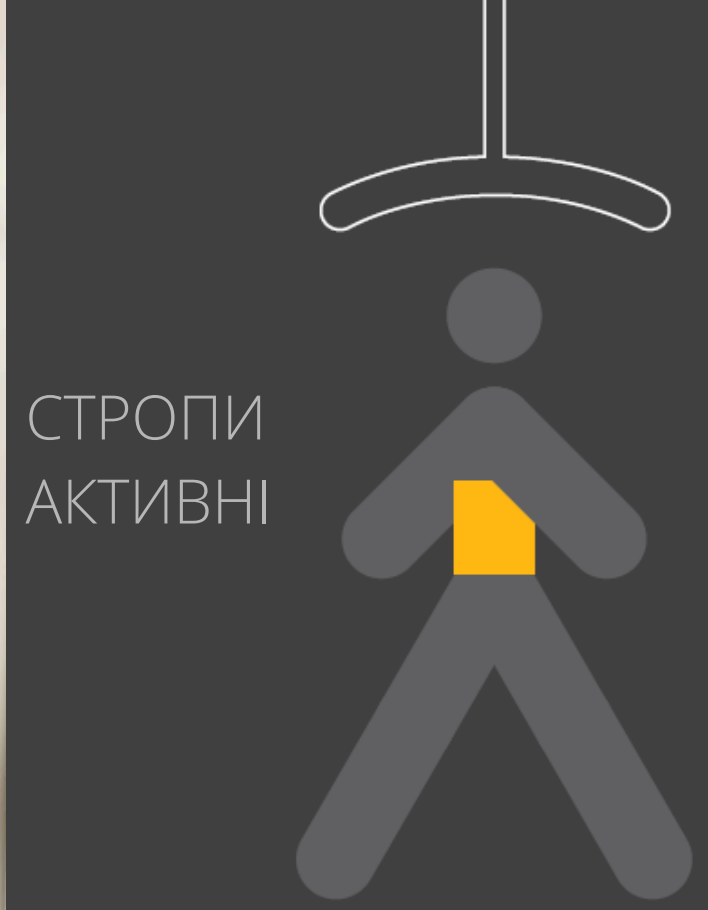

Активні | Active Micro

Підходить для пацієнтів, які можуть контролювати свою голову, але мають обмежені функції верхньої частини тіла та стегон. Стропу також можна використовувати у випадках, коли пацієнт страждає від спазмів при розгинанні.

- Цілі використання:**
- Переміщення від ліжка до туалету, ванної
  - Покращення роботи кишечника
  - Переміщення від ліжка до крісла


**Функції**  
Слінг Active Micro ідеально підходить для переміщення пацієнтів в положенні сидячи, для забезпечення доступу до туалету та виконання інших гігієнічних процедур.

Слінг підтримує верхню частину тіла (від тазу і майже до плечей) і закріплюється навколо грудей і верхньої частини стегна, при цьому опорні ремені автоматично затягуються під час фактичного підйому.

Слінг має великий отвір у нижній частині, який забезпечує доступ до одягу, поки пацієнт залишається сидіти в слінгу. Модель створена для ситуацій, в яких необхідно легко одягати та знімати слінг.



Всі розміри вказані в см

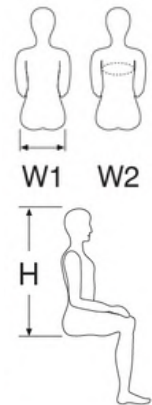

Розмір	W1	W2	H
Дитячий 4-6	25-30	55-90	45-60
Дитячий 6-10	28-35	60-95	55-70
Дитячий 10-14	28-35	65-100	55-70
XS	33-37	70-105	75-82
S	36-40	75-110	80-87
M	39-43	80-120	85-92
L	42-46	90-130	90-97
XL	45-49	100-140	95-102
2XL	48-53	110-150	95-102
3XL	52-58		95-102
4XL	57-63		95-102
5XL	62-73		95-102

**Поліестер** 

XS	S	M	L	XL	2XL
284031	284041	284051	284061	284071	284081
Макс. навантаження			255 кг		



Підходить для пацієнтів, які можуть контролювати свою голову, але мають обмежені функції верхньої частини тіла та стегон.

**Цілі використання:**

- Переміщення від ліжка до туалету, ванної
- Покращення роботи кишечника
- Переміщення від ліжка до крісла



**Функції**


Стропа Active Micro Plus ідеально підходить для переміщення пацієнтів в положенні сидячи, для забезпечення доступу до туалету та виконання інших гігієнічних процедур.

Стропа підтримує верхню частину тіла (від тазу і майже до плечей) і закріплюється навколо грудей і верхньої частини стегна. Еластичний опорний ремінь можна регулювати відповідно до індивідуальних потреб пацієнта.

Стропа має великий отвір у нижній частині, який забезпечує доступ до одягу, поки пацієнт залишається сидіти в слінгу. Модель створена для ситуацій, в яких необхідно легко одягати та знімати слінг.

Розмір	W1	W2	H
Дитячий 4-6	25-30	55-90	45-60
Дитячий 6-10	28-35	60-95	55-70
Дитячий 10-14	28-35	65-100	55-70
XS	33-37	70-105	75-82
S	36-40	75-110	80-87
M	39-43	80-120	85-92
L	42-46	90-130	90-97
XL	45-49	100-140	95-102
2XL	48-53	110-150	95-102
3XL	52-58		95-102
4XL	57-63		95-102
5XL	62-73		95-102

Всі розміри вказані в см

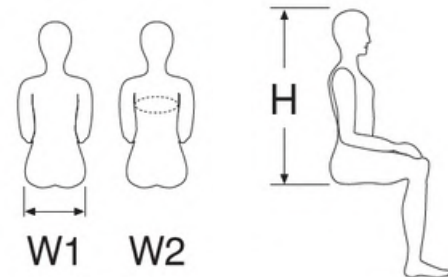

**Поліестер**



Дитячий 4-6	Дитячий 6-10	Дитячий 10-14	XS	S	M	L	XL	2XL	Макс. вага пацієнта
281001	281011	281021	281531	281541	281551	281561	281571	281581	255 кг

**Поліестер (одноразовий)**



			281535	281545	281555	281565	281575	281585	205 кг
--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Підходить для людей з порушення відчуття балансу, але здатних витримувати вагу свого тіла на ногах. Відновлення ходьби. Підтримка стоячого та вертикального положення. Рання мобілізація.

**Цілі використання:**

Зміна положення / Утримання рівноваги / Вертикальне положення стоячи: реакції, рефлекс / Сидяче положення: рівновага / Сидяче положення: реакції, рефлекс / Захисні реакції / Перенесення ваги / Відновлення ходи / Підйом по сходах, на бордюри / Реабілітація на біговій доріжці з опорою на вагу тіла / Виконання повсякденних справ.



**Функції**

Active Trainer — це стропа для ходьби для людей із достатньою міцністю ніг, для утримання вертикального положення, але яким важко тримати рівновагу.

Стропа допомагає стояти та забезпечує підтримку під час ходьби. Стропа підтримує груди і верхню частину спини, а лямки забезпечують підтримку навколо стегон і виключають ризик «вислизання» пацієнта.

Ця стропа ідеально підходить для ранньої мобілізації пацієнтів і гарантує безпеку як для пацієнтів, так і для медичного спеціаліста при відновленні рівноваги: сидячи на краю ліжка, стоячи або фактично ходячи.

Одноразова версія цього слінгу – Gait Trainer Disposable – має точно такі ж функції, але дещо інший дизайн.

Розмір	W2
Дитячий 4-6	55-90
Дитячий 6-10	60-95
Дитячий 10-14	65-100
XS	70-105
S	75-110
M	80-120
L	90-130
XL	100-140
2XL	110-150



Всі розміри вказані в см

W2

**Поліестер** 

Дитячий 4-6	Дитячий 6-10	Дитячий 10-14	XS	S	M	L	XL	2XL	Макс. вага пацієнта
283001	283011	283021	283031	283041	283051	283061	283071	283081	255 кг

**Поліестер (одноразовий)** 

				283545	283555	283565	283575	283585	205 кг
--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------





Підходить для людей з порушення відчуття балансу, але здатних витримувати вагу свого тіла на ногах. Відновлення ходьби. Підтримка стоячого та вертикального положення. Рання мобілізація.

**Цілі використання:**

Зміна положення / Утримання рівноваги / Вертикальне положення стоячи: реакції, рефлексі / Сидяче положення: рівновага / Сидяче положення: реакції, рефлексі / Захисні реакції / Перенесення ваги / Відновлення ходи / Підйом по сходах, на бордюри / Реабілітація на біговій доріжці з опорою на вагу тіла / Виконання повсякденних справ.

**Функції**

Gait Trainer — це стропа для ходьби для людей із достатньою міцністю ніг, для утримання вертикального положення, але яким важко тримати рівновагу.

Стропа Gait Trainer забезпечує необхідну підтримку під час ходьби та допомагає пацієнту підтримувати положення.

Стропа підтримує верхню частину тіла, а манжети на ногах підвищують безпеку. Стропа Gait Trainer ідеально підходить для ранньої мобілізації пацієнтів, тренування рівноваги, різних видів вправ стоячи або сидячи та тренування ходи, а також гарантує безпеку як для пацієнта так і для медичного спеціаліста.


Стропа призначений для використання разом із реабілітаційним модулем Guldmann, який є додатковою функцією, доступною з підйомником GN3+. Реабілітаційний модуль дає можливість використовувати підйомник як систему компенсації ваги в програмі реабілітації пацієнтів.

Розмір	W2
Дитячий 4-6	55-90
Дитячий 6-10	60-95
Дитячий 10-14	65-100
XS	70-105
S	75-110
M	80-120
L	90-130
XL	100-140
2XL	110-150

Сітка 

S	M	L	XL	2XL	Макс. вага пацієнта
283241	283251	283261	283271	283281	255 кг

Всі розміри вказані в см

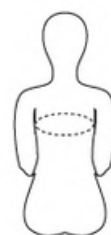


W2

Перегляд відео-інструкції





# СТРОПИ БАЗОВІ

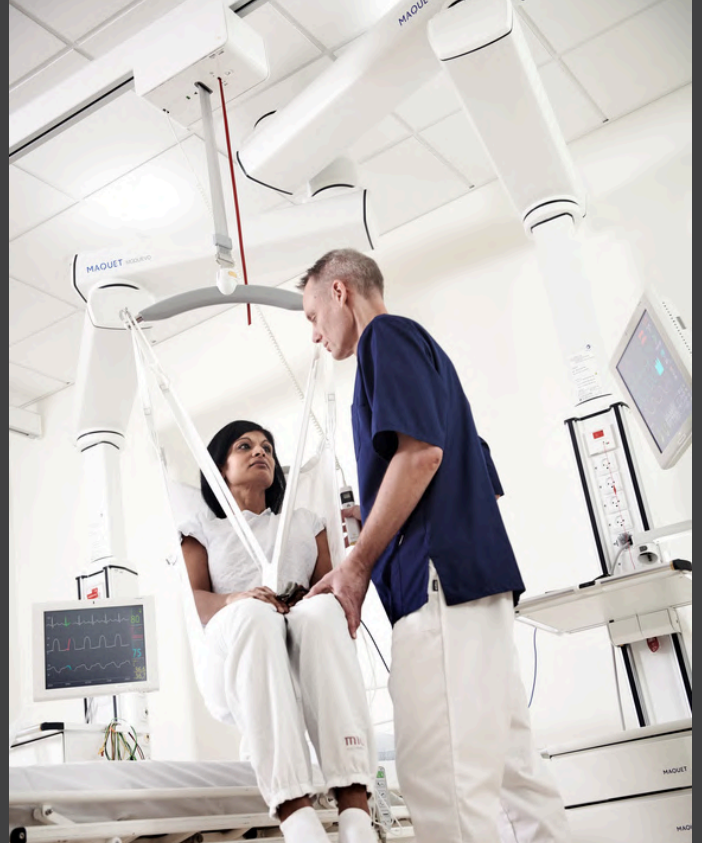

Basic

Basic Basic

*Підходить для людей які можуть контролюють голову, але потребують підтримки під час переміщення сидячи. Підйом та перенесення з усіх поверхонь (ліжка, кушетка, диван, крісло).*

### Цілі використання:

*Переміщення з ліжка на крісло / з ліжка до душового крісла / з ліжка до туалету / підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексії в сидячому положенні / переміщення в/з автомобіля / гігієнічні процедури*

### Функції

Стропа Basic Basic – це універсальна підйомна стропа, що підходить для різних пацієнтів та різних підйомних цілей. Стропа підтримує все тіло, окрім голови тому ідеально підходить для підйому, переміщення та позиціонування пацієнтів, які можуть контролювати свою голову, але погано контролюють верхню чи нижню частину тіла. Її можна використовувати з положення сидячи або лежачи (при підйомі лежачи ми рекомендуємо додатково використовувати підтримку для шиї).

Стропа доступна із різних матеріалів. Стропу з сітки можна використовувати для купання. Обидва матеріали дуже міцні і дозволяють повітрю циркулювати навколо тіла та забезпечують комфорт та підтримку для пацієнтів.

### Поліестер



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091
Макс. навантаження			255 кг (500кг в розмірі 3XL)			


### Сітка



XS	S	M	L	XL	2XL
270133	270143	270153	270163	270173	270183
Макс. навантаження			255 кг		



Всі розміри  
вказані в см

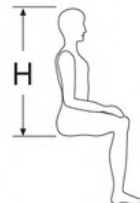

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102



Підходить для людей які можуть контролюють голову, але потребують підтримки під час переміщення сидячи. Підйом та перенесення з усіх поверхонь (ліжка, кушетка, диван, крісло).

### Зцілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло / з ліжка до душового крісла / з ліжка до туалету / підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексії в сидячому положенні / переміщення в/з автомобіля / гігієнічні процедури




### Функції

Стропа Basic Low – це універсальна стропа з підтримкою спини, що підходить для різних пацієнтів та різних підйомних цілей. Стропа підтримує нижню частину спини та область стегон, конструкція залишає руки пацієнта поза стропою під час підйому, що дозволяє їм брати участь у переміщенні.

Всі розміри вказані в см



W1

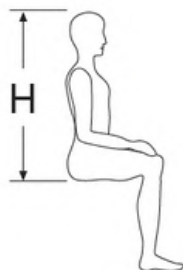

H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Поліестер



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091
Макс. навантаження			255 кг (500кг в розмірі 3XL)			

### Сітка



XS	S	M	L	XL	2XL
270133	270143	270153	270163	270173	270183
Макс. навантаження			255 кг		



Перегляд відео-інструкції





Підходить для людей з обмеженим контролем над головою і тілом, які потребують підтримки для переміщення в сидячому положенні. Підйом і переміщення з усіх поверхонь (ліжка, кушетка, диван, крісло).

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло/ з ліжка до душового крісла / з ліжка до туалету/ підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексії в сидячому положенні / переміщення в/з автомобіля / гігієнічні процедури



### Функції

Стропа Basic High - це стропа для підйому всього тіла, яка підходить для різних пацієнтів. Стропа підтримує все тіло, включаючи голову.

Стропа ідеально підходить для підйому, переміщення та позиціонування пацієнтів з обмеженим контролем голови, верхньої та нижньої частини тіла. Її можна використовувати в положенні сидячи або лежачи, наприклад, для підйому з підлоги, ліжка або інвалідного візка.

Стропа Basic High доступна в різних матеріалах. Версію з сітки можна використовувати як слінг для купання. Обидва матеріали дуже міцні та легкі в обробці, дозволяють повітрю циркулювати навколо тіла та забезпечують винятковий комфорт і підтримку для пацієнта.

### Всі розміри вказані в см



Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

## Поліестер

XS	S	M	L	XL	2XL
272031	272041	272051	272061	272071	272081
Макс. навантаження			255 кг		

## Сітка

XS	S	M	L	XL	2XL
272133	272143	272153	272163	272173	272183
Макс. навантаження			255 кг		

## Поліпропілен(одноразовий)

XS	S	M	L	XL	2XL
283635	283645	283655	283665	283675	283685
Макс. навантаження			205 кг		



Перегляд відео-інструкції



Стропа ідеально підходить для підйому, переміщення та позиціонування пацієнтів з обмеженим контролем над головою, верхньою та нижньою частиною тіла.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло / з ліжка до душового крісла / з ліжка до туалету / підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексії в сидячому положенні




### Функції

Стропа Basic Shell - це повнотіла стропа, призначена для підйому та переміщення людей, які не можуть контролювати голову та верхню частину тіла або мають обмежений контроль над ними. Вона забезпечує підтримку всього тіла та голови, залишаючи руки пацієнта поза стропою.

Стропу можна використовувати в положенні сидячи або лежачи - наприклад, з підлоги, ліжка або інвалідного візка. Стропу можна залишити на місці під пацієнтом - поки він/вона сидить в інвалідному візку.

Стропа Basic Shell виготовлена з сітчастого матеріалу, який можна використовувати як слінг для купання (наприклад, у басейні, ванні, душі). Матеріал дуже міцний і простий в обробці, дозволяє повітрю циркулювати навколо тіла і забезпечує відмінний комфорт і підтримку для пацієнта.

### Всі розміри вказані в см

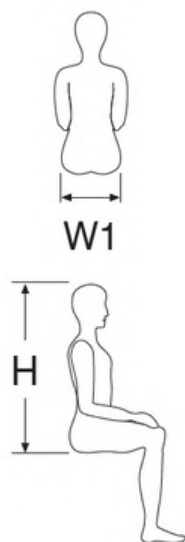

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102




### Перегляд відео-інструкції



### Сітка



XS	S	M	L	XL		
275032	275042	275052	275062	275072		
Макс. навантаження			255 кг			

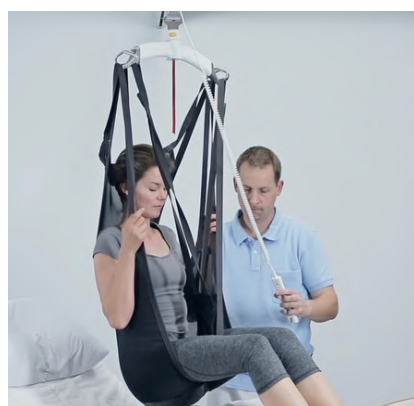

Підйом осіб, які мало контролюють своє тіло та голову, а також осіб з одинарними та подвійними ампутаціями. Підйом в положення лежачи або сидячи і з нього, а також для загальних переміщень з додатковою підтримкою в ділянці стегон.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло / з ліжка до душового крісла / з ліжка до туалету / підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексу в сидячому положенні / водна терапія




### Функції

Стропа Basic Comfort High призначена для підйому та переміщення пацієнтів з обмеженою або відсутньою руховою функцією голови та верхньої частини тіла. Стропа підтримує все тіло і голову, регульований підголовник можна скласти, якщо він не потрібен. Нижня частина стропи обшита м'яким матеріалом для додаткової підтримки стегон.

До стегових ременів додано дві червоні петлі, які можна використовувати для утримання стегон пацієнта в нейтральному положенні або для звільнення простору між ногами для гігієнічних процедур.

Ця модель стропи використовується для підйому в положення лежачи (в ліжку, на підлозі тощо) і з нього, а також в положення сидячи і з нього. Ця підйомна стропа підходить не тільки для більшості пацієнтів, але також може використовуватися для підйому з перекриттям стегових ременів під обома ногами - наприклад, при підйомі одно- або двоампутаційних пацієнтів - або для забезпечення індивідуальної/ роздільної підтримки ніг для пацієнтів, які особливо чутливі до тиску.

### Всі розміри вказані в см

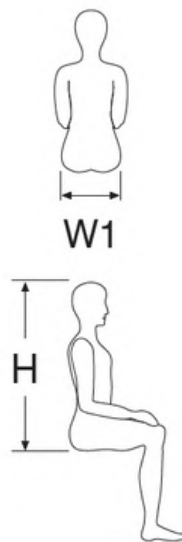

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Перегляд відео-інструкції



### Поліестер



XS	S	M	L	XL	2XL
277031	277041	277051	277061	277071	277081
Макс. навантаження			255 кг		

### Сітка



XS	S	M	L	XL	2XL
277032	277042	277052	277062	277072	277082
Макс. навантаження			255 кг		

### Поліестер(одноразовий)



XS	S	M	L	XL	2XL
277035	277045	277055	277065	277075	277085
Макс. навантаження			255 кг		



## СТРОПИ ІНДИВІДУАЛЬНІ



Custom Sit-On II

Підходить для людей, які тривалий час перебувають в стропі через велику вагу або спеціальний інвалідний візок.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло/ з ліжка в інвалідний візок / підйом з підлоги



### Функції

Стропа Sit-On II призначена для підйому та переміщення пацієнтів, які повинні залишатися сидячи в стропі. Вона підтримує стегна і спину і призначена для запобігання обертанню стегон всередину під час підйому.

Стропа призначена для підйому в положення сидячи з ліжка або інвалідного візка і назад, але встановлюється, коли пацієнт знаходиться в положенні лежачи. Стропа підходить для використання в сидячому положенні.

Стропа Sit-On II доступна в декількох розмірах і виготовлена з сітчастого матеріалу, який пропускає повітря, дозволяючи йому циркулювати навколо тіла, зменшуючи ризик утворення тепла і вологи.

Всі розміри  
вказані в см




Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Сітка

XS	S	M	L	XL	
297031	297041	297051	297061	297071	
Макс. навантаження			255 кг		



Перегляд відео-інструкції

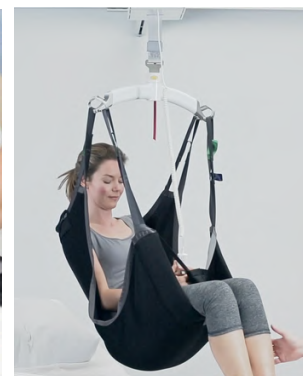

Підходить для людей, які тривалий час перебувають в стропі через велику вагу або спеціальний інвалідний візок.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло/ з ліжка в інвалідний візок / підйом з підлоги / переміщення на мат або стіл-вертикалізатор



### Функції

Sit-On High II - це стропа, призначена для підйому та переміщення пацієнтів, які повинні залишатися сидячи на стропі. Підставка для голови може бути відрегульована відповідно до потреб користувача і може бути відкинута, коли він сидить в інвалідному візку. Стропа підтримує стегна, спину і голову і призначена для запобігання обертанню стегон всередину під час підйому.


Стропа використовується для підйому в положення сидячи з ліжка або інвалідного візка і назад, але встановлюється, коли пацієнт знаходиться в положенні лежачи. Стропа підходить для того, щоб залишатися під нею в сидячому положенні.

Стропа Sit-On High II доступна в декількох розмірах і виготовлена з сітчастого матеріалу, який пропускає повітря, дозволяючи йому циркулювати навколо тіла, зменшуючи ризик утворення тепла і вологи.

### Всі розміри вказані в см



W1

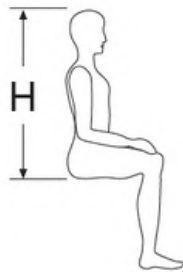

H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102



### Сітка

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091
Макс. навантаження			255 кг			



Перегляд відео-інструкції



Підйом пацієнтів з одинарними і подвійними (вище колінного суглоба) ампутаціями. Підйом пацієнтів з подвійними і високими ампутаціями. Підйом з положення сидячи або лежачи.

### Цілі використання:

Переміщення в сидячому положенні / з ліжка на крісло / з ліжка до душевого крісла / інвалідного крісла




### Функції

Стропа Custom Amputee призначена для підйому і переміщення людей, у яких одна або обидві ноги ампутовані вище колінного суглоба, а також для підйому людей, у яких обидві ноги повністю ампутовані. Модель Amputee підтримує все тіло до плечей включно, з додатковою підтримкою навколо тазу.

Строп можна використовувати для перенесення з сидячого або лежачого положення, наприклад, з підлоги, ліжка або інвалідного візка. При підйомі з положення лежачи слід використовувати шийну опору Guldmann для забезпечення підтримки осіб з обмеженим контролем або без контролю голови.

### Всі розміри вказані в см

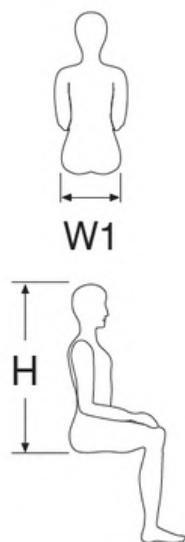

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Поліестер

XS	S	M	L	XL		
290031	290041	290051	290061	290071		
Макс. навантаження			255 кг			



Перегляд відео-інструкції



Підходить для осіб, які тривалий час перебувають у стропі через велику вагу або перевантажений інвалідний візок. Тканина допомагає запобігти виділенню тепла і може використовуватися для людей з тендітною шкірою.

**Цілі використання:**

Переміщення з ліжка на крісло/ інвалідного крісла / підйом з підлоги / переміщення на мат або стіл-вертикалізатор




**Функції**

Стропа призначена для підйому в положення сидячи з ліжка або інвалідного візка і назад, але встановлюється, коли пацієнт знаходиться в положенні лежачи. Стропа забезпечує додатковий комфорт під час підйому і підходить для того, щоб залишатися з нею в сидячому положенні.

Стропа Sit-On Comfort доступна в декількох розмірах і виготовлена з розп'ятого матеріалу. Міцний і простий в обробці, цей матеріал забезпечує додатковий комфорт і є повітропроникним, дозволяючи повітрю циркулювати навколо тіла, зменшуючи ризик утворення тепла і вологи.

**Всі розміри вказані в см**

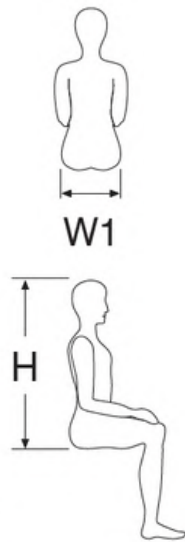

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

**Сітка**



XS	S	M	L	XL		
293031	293041	293051	293061	293071		
Макс. навантаження			255 кг			



Перегляд відео-інструкції



Підходить для осіб, які тривалий час перебувають у стропі через велику вагу або перевантажений інвалідний візок. Тканина допомагає запобігти виділенню тепла і може використовуватися для людей з тендітною шкірою.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло/ інвалідного крісла / підйом з підлоги / переміщення на мат або стіл-вертикалізатор

### Функції


Sit-On Comfort High - це стропа, призначена для підйому та переміщення пацієнтів, які повинні залишатися сидючи в стропі. Підтримка для голови може бути відрегульована відповідно до потреб пацієнта і може бути відкинута, коли він сидить в інвалідному візку.

Стропа підтримує стегна, спину і голову і призначена для запобігання обертанню стегон всередину під час підйому.

Стропа використовується для підйому в положення сидючи з ліжка або інвалідного візка, але її можна використовувати і в положенні лежачи.

Стропа Sit-On Comfort High доступна в декількох розмірах і виготовлена з матеріалу Сітка. Міцний і простий в обробці, цей матеріал забезпечує додатковий комфорт і повітропроникність, дозволяючи повітрю циркулювати навколо тіла, зменшуючи ризик утворення тепла і вологи.

### Всі розміри вказані в см


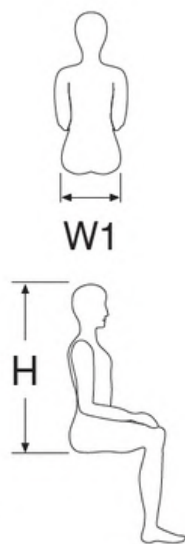


Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Сітка



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091
Макс. навантаження			255 кг			

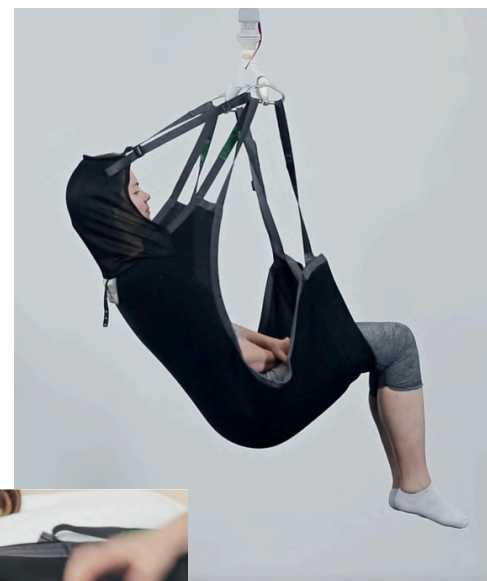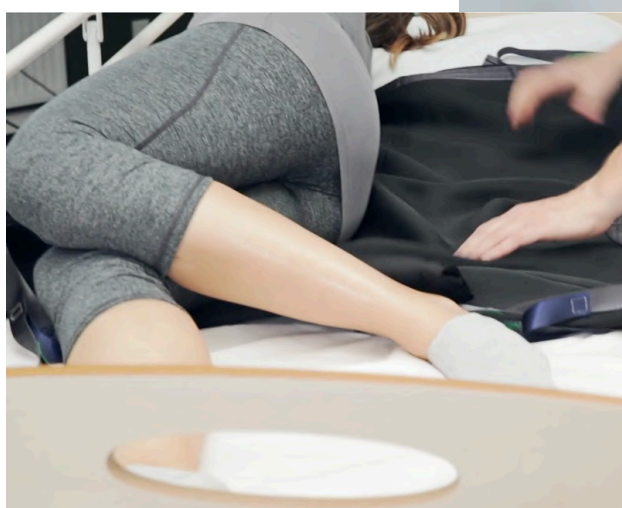

Перегляд відео-інструкції





Застосовується для переміщення пацієнта з ліжка в туалет або ванну кімнату. Можна не знімати з пацієнта під час відвідування туалету. НЕ рекомендується залишати стропу на пацієнті в інвалідному кріслі через ризик виникнення проблем навколо відкритої нижньої частини.

**Цілі використання:**

Переміщення з ліжка в туалет, ванну



**Функції**

Стропа Sit-On Comfort High Hygiene розроблена з відкритою нижньою частиною, щоб полегшити відвідування туалету та виконання інших гігієнічних процедур.

Стропа підтримує стегна, спину та голову і запобігає обертанню стегон всередину під час підйому. За потреби можна використовувати регульовану опору для голови.


Гігієнічна стропа використовується для підйому в положення сидячи з ліжка або інвалідного візка і назад, але вона встановлюється, коли пацієнт знаходиться в положенні лежачи.

Гігієнічна стропа Sit-On Comfort High Hygiene доступна в декількох розмірах і виготовлена з матеріалу Сітка. Міцний і простий в обробці, цей матеріал забезпечує максимальний комфорт і доступ повітря, дозволяючи повітрю циркулювати навколо тіла, знижуючи ризик утворення тепла і вологи.

**Всі розміри вказані в см**



W1

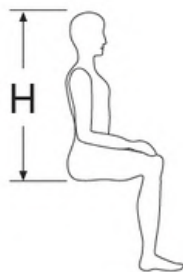

H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

**Сітка**



XS	S	M	L	XL		
294131	294141	294151	294161	294171		
Макс. навантаження			255 кг			





## СТРОПИ ДИТЯЧІ




### Дитяча | Active Vest

*Підходить для дітей, які можуть контролювати голову, але мають проблеми з рівновагою в положенні стоячи та контролем над тулубом. Дитина повинна мати можливість переносити вагу на нижні кінцівки. Добре підходить для підтримки у вертикальному положенні, рівноваги стоячи та для пересування.*

#### **Цілі використання:**

*Пересування / відновлення рівноваги стоячи / реакції, рефлексії в вертикальному положенні / перенесення ваги / тренування ходи / відновлення ходьби по сходах, сходинках, бордюрах / відновлення ходьби з біговою доріжкою*

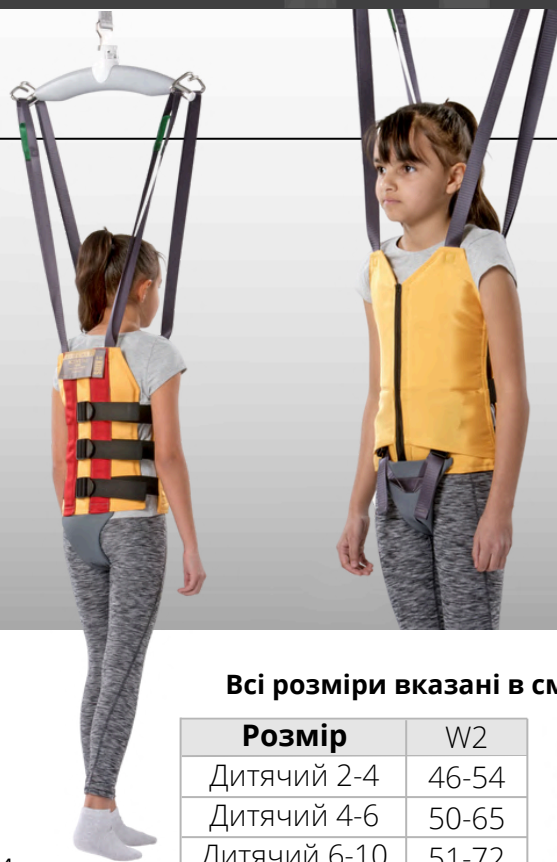

#### **Всі розміри вказані в см**

Розмір	W2
Дитячий 2-4	46-54
Дитячий 4-6	50-65
Дитячий 6-10	51-72
Дитячий 10-16	56-75



W2

#### **Функції**

Active Vest - це стропа, яка допомагає підтримувати вертикальне положення та забезпечує підтримку під час ходьби.

Дитяча стропа підтримує верхню частину тіла дитини та область тазу, підтримуючи пацієнта при виконанні вправ на стояння, ходіння, а також тренуванні рівноваги та іграх. Допомагає забезпечити впевненість і безпеку як дитині, так і медичному персоналу.

#### **Поліестер**



**Перегляд відео-інструкції**

2-4	4-6	6-10	10-16
2831000	283101	283111	283121
Макс. навантаження		100 кг	



Підходить для дітей, які можуть контролювати голову, але потребують підтримки під час пересаджування в сидячому положенні. Підйом і перенесення з усіх поверхонь кушеток, калясок, стільців.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло/ з ліжка до душового крісла / з ліжка до туалету/ підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексії в сидячому положенні/ водна терапія / пересаджування в машину/ проведення гігієнічних процедур

### Функції

Стропа Basic Basic - це універсальна підйомна стропа, яка підходить для широкого кола пацієнтів і підйомних операцій. Стропа підтримує все тіло, за винятком голови. Внутрішній ремінь забезпечує додаткову підтримку та безпеку.

Ця педіатрична стропа ідеально підходить для підйому, переміщення та позиціонування дітей які можуть контролювати свою голову, але мають обмежений контроль над верхньою частиною тіла.

Її можна використовувати для більшості видів підйому, а також для переміщення в положення сидячи і лежачи - наприклад, з ліжка або інвалідного візка - там, де немає необхідності допомагати пацієнту підтримувати голову.

Стропа Basic Basic доступна в декількох розмірах і з двох різних матеріалів. Сітчасту версію можна також використовувати для ванни. Обидва матеріали дуже міцні і прості в обробці, дозволяють повітрю циркулювати навколо тіла і забезпечують відмінний комфорт і підтримку для пацієнта.

### Поліестер

4-6	6-10	10-14
270001	270011	270021
Макс. навантаження		255 кг

### Сітка

4-6	6-10	10-14
270103	270113	270123
Макс. навантаження		255 кг



Всі розміри  
вказані в см



W1



H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102



Перегляд відео-  
інструкції





Підходить для дітей, які можуть контролювати голову, але потребують підтримки під час пересаджування в сидячому положенні. Модель Basic High розроблена як універсальна підйомна стропа для більшості ситуацій підйому з будь-яких поверхонь.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло / з ліжка до душового крісла / з ліжка до туалету / підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексії в сидячому положенні / водна терапія / пересаджування в машину

### Функції

Стропа Basic High - це універсальна підйомна стропа, яка підходить для широкого кола пацієнтів і підйомних операцій. Стропа підтримує все тіло, включаючи голову. Внутрішній ремінь забезпечує додаткову підтримку та безпеку.

Ця дитяча стропа ідеально підходить для підйому, переміщення і позиціонування дітей, у яких знижений контроль над головою, верхньою і нижньою частиною тіла. Її можна використовувати в положенні сидячи або лежачи - наприклад, на підлозі, ліжку або в інвалідному візку.

Стропа Basic High доступна в декількох розмірах і з різних матеріалів. Стропа з сітки також може використовуватися для ванни. Всі матеріали дуже міцні і легкі в обробці, дозволяють повітрю циркулювати навколо тіла і забезпечують відмінний комфорт і підтримку для пацієнта.

### Всі розміри вказані в см



W1



H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102



### Поліпропілен (одноразова)

4-6	6-10	10-14
	283615	
Макс. навантаження		205 кг

### Поліестер

4-6	6-10	10-14
272001	272011	272021
Макс. навантаження		255 кг

### Сітка

4-6	6-10	10-14
272103	272113	272123
Макс. навантаження		255 кг

Підходить для дітей, які тривалий час перебувають в стропі через велику вагу або спеціальний інвалідний візок.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло/ інвалідне крісло / підйом з підлоги / переміщення на мат чи стіл-вертикалізатор



### Функції

Стропа Sit-On II призначена для підйому і переміщення дітей, які повинні залишатися в стропі сидячи. Вона підтримує стегна і спину і призначена для запобігання обертанню стегон всередину під час підйому.


Стропа призначений для підйому в сидячому положенні з ліжка або інвалідного візка і назад, але може використовуватися і в лежачому положенні. Стропа підходить для того, щоб залишатися під ним, коли дитина сидить.

Ця дитяча стропа виготовлена з сітчастого матеріалу, який пропускає повітря, дозволяючи йому циркулювати навколо тіла, зменшуючи ризик утворення тепла і вологи.

### Всі розміри вказані в см



W1

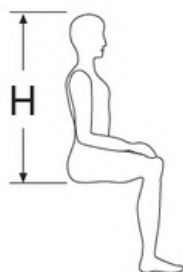

H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Сітка

4-6	6-10
297001	297011
Макс. навантаження	255 кг



Підходить для дітей, які тривалий час перебувають в стропі через велику вагу або спеціальний інвалідний візок.

### Цілі використання:

Переміщення з ліжка на крісло/ інвалідне крісло / підйом з підлоги / переміщення на мат чи стіл-вертикалізатор



### Функції

Sit-On High II - це стропа, призначена для підйому та переміщення пацієнтів, які повинні залишатися в стропі сидячи. Підставка для голови регулюється відповідно до потреб дитини і може бути відкинута, коли вона сидить в інвалідному візку. Стропа підтримує стегна, спину та голову і призначений для запобігання обертанню стегон всередину під час підйому.


Ця дитяча стропа використовується для підйому в положення сидячи з ліжка або інвалідного візка і назад, але її можна використовувати, коли дитина знаходиться в положенні лежачи. Стропу можна залишати під дитиною, коли вона сидить.

Стропа Sit-On High II виготовлена з сітчастого матеріалу, який пропускає повітря, дозволяючи йому циркулювати навколо тіла, зменшуючи ризик утворення тепла і вологи.

Всі розміри  
вказані в см




W1

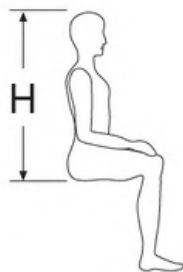

H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

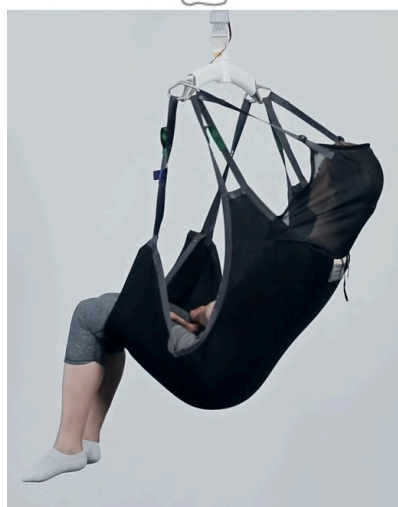

### Сітка



4-6	6-10
298001	298011
Макс. навантаження	255 кг



Дитяча Sit-On Comfort  
Sit-On Comfort High

Підходить для дітей, які тривалий час перебувають в стропі через велику вагу або спеціальний інвалідний візок. Тканина запобігає утворенню тепла і може використовуватися для дітей з тендітною шкірою.

**Цілі використання:**

Переміщення з ліжка на крісло/ інвалідне крісло / підйом з підлоги / переміщення на мат чи стіл-вертикалізатор

**Функції**


Стропа Sit-On Comfort - призначена для підйому та переміщення дітей, які повинні сидіти в стропі. Вона підтримує стегна і спину, а також запобігає обертанню стегон всередину під час підйому. Стропа Sit-On Comfort High має додаткову підтримку для голови.

Ця дитяча стропа призначена для підйому в положення сидячи з ліжка або інвалідного візка і назад, він встановлюється, коли дитина перебуває в положенні лежачи. Стропа забезпечує додатковий комфорт під час підйому, а також підходить для того, щоб залишатися під ним, коли дитина сидить.

Модель Sit-On Comfort доступна в декількох розмірах і виготовлена з розпiрного матеріалу. Міцний і простий в обробці, цей матеріал забезпечує максимальний комфорт і повітропроникний, дозволяючи повітрю циркулювати навколо тіла, знижуючи ризик утворення тепла і вологи.





**Всі розміри вказані в см**

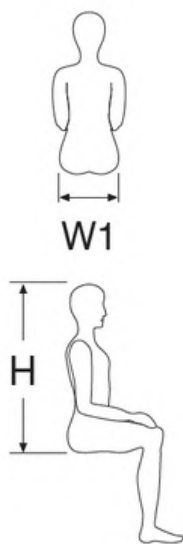

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

Сітка 	4-6	6-10
Sit-On Comfort	293001	293011
Sit-On Comfort High	294001	294011
Макс. навантаження	255 кг	

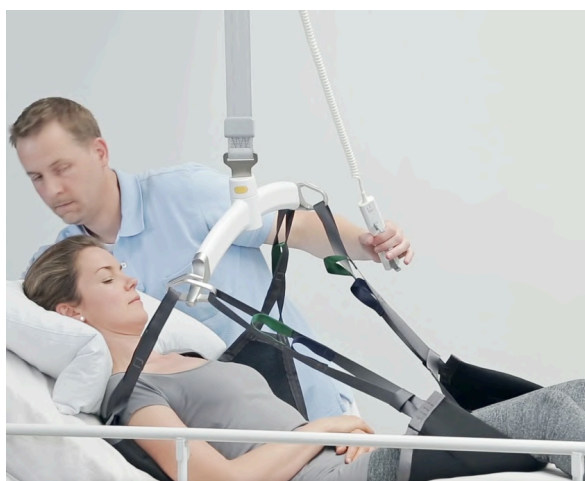

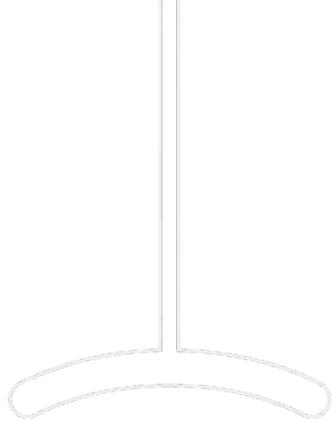

## СТРОПИ БАРІАТРИЧНІ



### Баріатрична Basic High

*Підходить для підйому, переміщення та позиціонування людей з обмеженим контролем над головою, верхньою та нижньою частиною тіла. Її можна використовувати в положенні сидячи або лежачи, наприклад, з підлоги, ліжка або інвалідного візка. Стропа баріатрична Basic High розроблена як універсальна підйомна стропа для більшості ситуацій.*

#### Цілі використання:

*Переміщення з ліжка в крісло / з ліжка в душове крісло / з ліжка до туалету / підйом з підлоги / сидяче положення з підтримкою / утримання рівноваги сидячи / реакції та рефлексії в сидячому пересаджуванні в машину / проведення гігієнічних процедур*



#### Функції

Баріатрична стропа Basic High - це універсальна підйомна стропа, яка підходить для людей з діагнозом «баріатрія». Стропа підтримує все тіло, включаючи голову. Стропа є продовженням моделі Basic High з лінійки ABC, де дизайн був адаптований до пропорцій людей з ожирінням. На додаток до збільшеної вантажопідйомності, баріатрична стропа оснащена довгими та ширшими лямками для ніг і має більші розміри як для верхньої, так і для нижньої частини тіла. На додаток до кишені для позиціонування на спині, на баріатричній стропі також є кишеня для позиціонування на внутрішній стороні стегнових ременів, яка, за допомогою додаткового фіксатора, полегшує позиціонування та встановлення стропи.

#### Всі розміри вказані в см



W1



H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

#### Поліестер

3XL	4XL	5XL
2720913	2720914	2720916
Макс. навантаження		500 кг

#### Поліестер (одноразовий)

L/XL	XL/2XL	2XL/3XL
283672	283682	283692
Макс. навантаження		500 кг



Перегляд відео-інструкції



Відновлення ходи та рання мобілізація людей з великими розмірами. Підвищує впевненість як для пацієнта, так і для того, хто доглядає за ним, під час відновленні рівноваги сидячи, стоячи і при ходьбі.

**Цілі використання:**

Зміна положення / Утримання рівноваги / Вертикальне положення стоячи: реакції, рефлексії/ Сидяче положення: рівновага / Захисні реакції / Перенесення ваги / Часткове розвантаження ваги/ Відновлення ходи / Підйом по сходах, на бордюри / Виконання повсякденних справ.



**Функції**

Gait Trainer - це стропа, яка допомагає підтримувати стояче положення та забезпечує підтримку під час ходьби.

Стропа має форму коротких штанів, які підтримують пацієнта в області тазу та живота. Така конструкція допомагає запобігти «здавлюванню» шлунку пацієнта, а також усуває ризик того, що пацієнт може прослизнути крізь стропу. Вона призначена для підтримки пацієнта в положенні стоячи і забезпечує оптимальний комфорт.

**Всі розміри вказані в см**



W1



H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

**Поліестер** 

Один розмір	
283100	
Макс. навантаження	500 кг


**Перегляд відео-інструкції**



Стропа полегшує виконання гігієнічних процедур для людей з великою масою живота. Утримує та підтримує підколінну ямку в положенні лежачи на спині.

### Цілі використання:

Гігієнічні процедури / Догляд за шкірою / Обробка ран

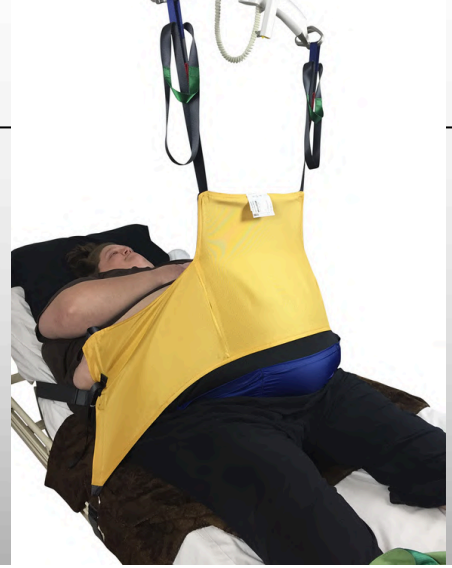

### Функції

Pannus Support - це опорна стропа, яку можна використовувати зі стельовим підйомником для надання допомоги під час проведення процедур особистої гігієни та догляду за шкірою.

Pannus Support допомагає підтримувати підколінну ямку в положенні, яке полегшує огляд, лікування та догляд за шкірою пацієнта.

Стропа призначена для усунення важкого ручного підйому пацієнта, що часто спричиняє надмірне фізичне навантаження на медичний персонал. Це також зменшує кількість персоналу, необхідного для проведення процедури.

### Всі розміри вказані в см



W1



H

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Поліестер

Один розмір

28660

Макс. навантаження 255 кг

### Перегляд відео-інструкції



Стропа допомагає виконувати зміну постільної білизни, перевертання пацієнта для виконання гігієнічних процедур або для зміни положення пацієнта в ліжку.

**Цілі використання:**

Переміщення - підняття в ліжку / Перевертання пацієнта / Виконання рентгена / Комп'ютерна томографія / МРТ / Переміщення лежачи на боці / Підйом з підлоги / Перенесення з столу-вертикалізатора




**Функції**

Баріатрична стропа для переміщення ідеально підходить для перевертання, переміщення та зміни положення пацієнта в ліжку. Стропа підтримує все тіло, включаючи голову, і піднімає пацієнта в лежачому положенні на ліжко, носі або підлогу.

**Поліестер**

Один розмір	
284656	
Макс. навантаження	500 кг
Довжина:	1900 мм
Ширина:	1630 мм

Всі розміри вказані в см

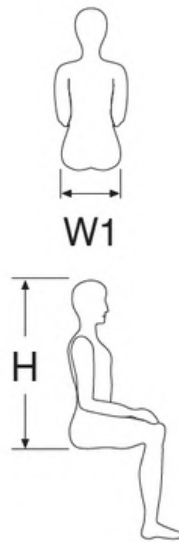

Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102



Перегляд відео-інструкції



Стропа допомагає виконувати поворот і позиціонування пацієнта в латеральному положенні; усуває небезпеку статичного утримання, забезпечуючи при цьому комфортний доступ до шкіри пацієнта для очищення, обробки ран, оцінки та лікування.

### Цілі використання:

Перевертання пацієнта / Виконання гігієнічних процедур / Оцінка / Перевірка шкіри / Терапевтичні завдання



### Функції


Баріатрична стропа Twin Turner використовується в поєднанні з підйомником, щоб повернути пацієнта і покласти його на бік, уникаючи зайвого навантаження на людину, яка надає медичну допомогу.

Стропа дозволяє перевертати пацієнта з боку на бік, не знімаючи стропу з-під пацієнта. Вона може допомогти встановити загальну стропу без необхідності вручну повертати або іншим чином переміщати пацієнта. Поворотна стропа має відносно невелику поверхню, що полегшує огляд, догляд та лікування шкіри пацієнта.

Всі розміри  
вказані в см



W1

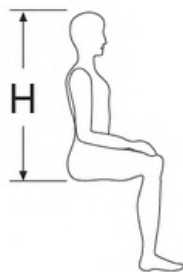

H



Розмір	W	H
Дитячий 4-6	25-30	45-60
Дитячий 6-10	28-35	55-70
Дитячий 10-14	28-35	55-70
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-46	90-97
XL	45-49	95-102
2XL	48-53	95-102
3XL	52-58	95-102
4XL	57-63	95-102
5XL	62-73	95-102

### Поліестер


Один розмір

28760


Макс. навантаження 500 кг

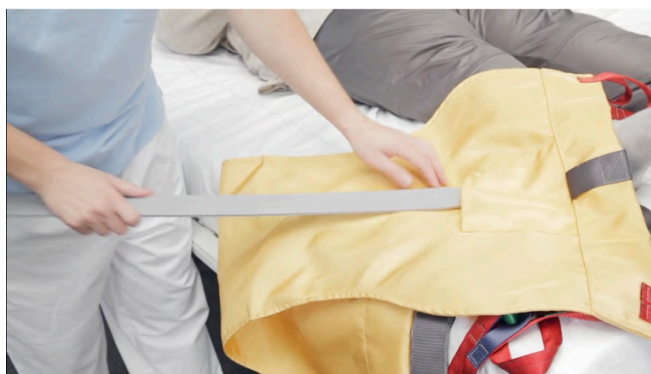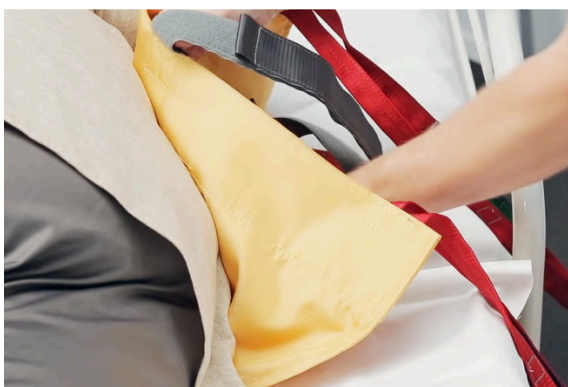

Перегляд відео-інструкції

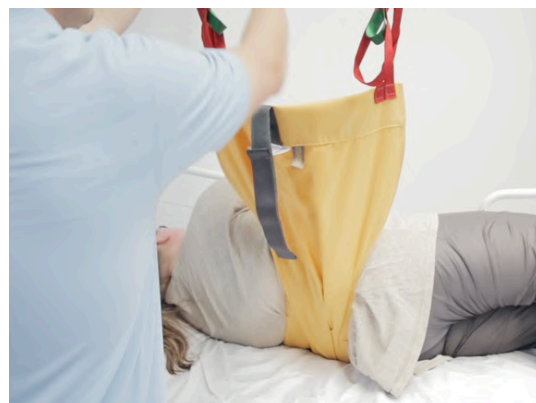

## СТРОПИ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ

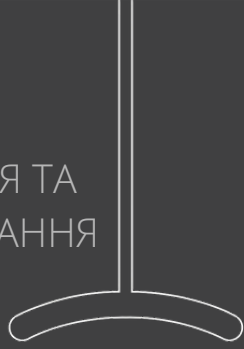

Для переміщення  
та позиціонування

Стропа для ніг

Стропа використовується в разі необхідності підйому та тривалого утримання кінцівок пацієнта.

### Цілі використання:

Підйом / утримання / положення кінцівки /  
Догляд за діабетиками



### Функції

Стропа для ніг підтримує та піднімає кінцівки, уникаючи зайвого навантаження на людину, яка надає допомогу.

Стропа використовується для підйому рук або ніг, а також для підтримки кінцівок при виконанні таких дій, як обробка ран, перев'язки або при проведенні процедур особистої гігієни. Підтримка ноги при надяганні терапевтичних шкарпеток або для підтримки/підйому ноги при надяганні ходунків ROM (бандаж для взуття) або апарату СРМ (колінний апарат).

### Поліестер



Один розмір	
28650	
Макс. навантаження	255 кг

### Поліпропілен (одноразова)



Один розмір	
286501	
Макс. навантаження	205 кг



Перегляд відео-  
інструкції



# Для переміщення та позиціонування Multi Support

Стропа використовується в разі необхідності підйому та тривалого утримання деяких частин пацієнта.

## Цілі використання:

Підйом / утримання / позиціонування певних частин тіла пацієнта / Допомога у введенні СРМ / Проведення гігієнічних процедур / Позиціонування на операційному столі / Реабілітаційні та тренувальні вправи



## Функції

Стропа Multi Support підтримує і піднімає кінцівки та інші частини тіла пацієнта, уникаючи зайвого навантаження на медичний персонал, який надає допомогу.

Стропа використовується для підйому або підтримки певних частин тіла, таких як тулуб, таз, ноги або руки. Можна виконувати терапевтичні процедури та завдання, наприклад, підкладати під пацієнта клини, розміщувати рентгенівські касети. Підтримка кінцівок для виконання таких дій, як обробка ран, перев'язки або при проведенні процедур особистої гігієни. Він також може бути використаний для проведення ранньої мобілізації.



Перегляд відео-інструкції

## Поліестер

Один розмір	
28467	
Макс. навантаження	255 кг

## Поліпропілен (одноразова)

Один розмір	
284223	
Макс. навантаження	255 кг

Для переміщення та позиціонування **OR Sling**

Стропа використовується в разі необхідності горизонтального підйому і переміщення між операційним столом і ношами/ліжком повинні виконуватися тільки двома особами.

### Цілі використання:

Горизонтальний підйом/переміщення / Позиціонування / утримання верхньої частини тіла / Оперативні процедури

### Функції

Операційна стропа використовується в поєднанні з перехресним підвісом Guldmann для переміщення верхньої частини тіла пацієнта на операційний стіл або для підйому його з операційного столу в горизонтальному положенні.

Довжина і конструкція стропи роблять її дуже корисною для оперативних втручань на нижніх ділянках тіла пацієнта, таких як гінекологічні процедури.

Операційна стропа використовується з шістьма підйомними ременями з застібними гачками. Підйомні ремені з застібними гачками можна використовувати повторно для декількох операційних строп, незалежно від розміру. Підйомні ремені можна легко зняти зі стропи, щоб вони не заважали до і після переміщення пацієнта.

Використання операційної стропи в поєднанні зі стельовим підйомником запобігає тертю та порізам шкіри і тканин пацієнта. Крім того, операційна стропа запобігає зайвому навантаженню на персонал і підвищує безпеку пацієнта.

### Поліпропілен (одноразова)

М	Л	стропа з крючками
284855	284865	284801
Макс. навантаження		255 кг

### Поліестер

М	Л	стропа з крючками
284851	284861	284801
Макс. навантаження		255 кг



Ідеально підходить для підготовки до обстеження та хірургічного втручання, коли пацієнт знаходиться в положенні лежачи на боці або лежачи на спині на вузьких поверхнях з залежними та седативними пацієнтами.

### Цілі використання:

Бічне позиціонування / Позиціонування в положенні лежачи / Підйом тулуба / Підйом кінцівок / Підйом тазу / Підйом ніг після спинномозкової седації



### Функції

Позиціонуюча стропа - це рішення для перевертання пацієнта, яке складається з декількох різних строп. Вона призначена для полегшення процесу перевертання пацієнта з положення лежачи на спині в положення лежачи на животі і має можливість зворотного перевертання. Ця процедура, як правило, проводиться для операцій на хребті або подібних процедур.

Стропа запобігає тертю та іншим впливам на шкіру і тканини пацієнта.

Використання системи позиціонування не тільки допомагає контролювати процес, але й покращує робоче середовище та зменшує кількість персоналу, необхідного для проведення процедури.

Весь пакет складається з  
2 x позиціонуючі стропи  
2 x мультипідставки  
1 x Запобіжний ремінь



Перегляд відео-інструкції



### Поліестр

Один розмір (Пакет для позиціонування в положенні лежачи)	Один розмір (Стропа для бічного позиціонування)
284225	284226
Макс. навантаження	255 кг





Стропа підходить для повороту пацієнта на бік, перевертання пацієнта в ліжку, підтримка в сидячому положенні з головою і тулубом вперед, бічні переміщення в положенні лежачи на іншу поверхню, наприклад, на ліжко або носилки, а також повне підняття пацієнта в положенні лежачи

**Цілі використання:**

Переміщення / підйом у ліжку / Поворот пацієнта / Приліжковий портативний рентген/ Комп'ютерна томографія / МРТ / Переміщення пацієнта лежачи на боці / Підйом з підлоги / Переміщення з столу-вертикалізатора



**Функції**

Стропа для переміщення ідеально підходить для перевертання, переміщення та зміни положення пацієнта в ліжку.

Стропа підтримує все тіло, включаючи голову, і піднімає пацієнта в лежачому положенні на ліжку, носі або підлогу. Її часто використовують для зміни постільної білизни, перевертання пацієнта для виконання гігієнічних процедур або для перекладання пацієнта в ліжку.

Стропу можна залишити під пацієнтом, щоб вона була готова до використання для виконання завдань з догляду.



**Поліестр**



Стандарт (1830мм)	Коротка (1350мм)
28465	284653
Макс. навантаження	500 кг

**Поліестр (сітка)**



Стандарт (1830мм)	Довга (2130мм)
284658	284651
Макс. навантаження	500 кг

**Поліестр (одноразовий)**



Стандарт (1830мм)
284555
Макс. навантаження
500 кг

**Поліестр (з підкладкою)**



Стандарт (1830мм)
284659
Макс. навантаження
500 кг



Перегляд відео-інструкції

Стропа підходить для повороту пацієнта на бік, перевертання пацієнта в ліжку, підтримка в сидячому положенні з головою і тулубом вперед, бічні переміщення в положенні лежачи на іншу поверхню, наприклад, на ліжко або носилки, а також повне підняття пацієнта в положенні лежачи

### Цілі використання:

Переміщення / підйом у ліжку / Поворот пацієнта / Приліжковий портативний рентген/ Комп'ютерна томографія / МРТ / Переміщення пацієнта лежачи на боці / Підйом з підлоги / Переміщення з столу-вертикалізатора



### Функції

Стропа для переміщення, виготовлена з тканини TENCEL, ідеально підходить для перевертання, переміщення та перекладання пацієнта в ліжку.

Стропа підтримує все тіло, включаючи голову, і піднімає пацієнта в лежачому положенні на ліжко, носилки або підлогу. Часто використовується при зміні постільної білизни, перевертанні пацієнта для виконання гігієнічних процедур або для перекладання користувача в ліжку.

Ця стропа виготовлена із суміші поліестеру та матеріалу TENCEL. TENCEL - це органічний матеріал з важливими антибактеріальними та терморегулюючими властивостями. Спеціальні волокна TENCEL також надзвичайно м'які і забезпечують додатковий комфорт для пацієнтів з особливо чутливою шкірою.



### Антибактеріальний матеріал TENCEL


	Стандарт (2130мм)
	284657
Макс. навантаження	375 кг



Стропа підходить для розміщення під пацієнтом без необхідності перевертати або переміщати її. Менша площа поверхні матеріалу для цієї стропи забезпечує доступ до шкіри пацієнта для огляду, лікування та догляду.

**Цілі використання:**

Поворот пацієнта / Гігієнічні процедури /  
Оцінка / Огляд шкіри / Перевертання / Побічні  
функціональні завдання / Терапевтичні вправи

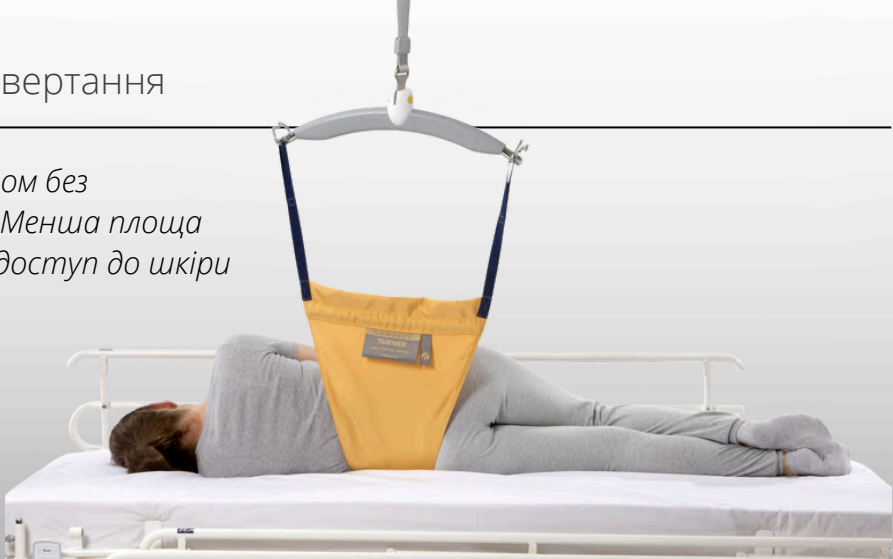

**Функції**

Стропа для перевертання використовується для перевертання пацієнта на бік, щоб уникнути зайвого навантаження на людину, яка здійснює догляд за пацієнтом.

Стропа дозволяє перевернути пацієнта на бік, вона може допомогти встановити загальну стропу без необхідності вручну перевертати або іншим чином переміщати пацієнта. Вона також використовується для підтримки пацієнта в положенні на боці, щоб поперемінно знімати тиск, коли він лежить протягом тривалого часу.



Перегляд відео-  
інструкції



Поліестр 

Один розмір

28700

Макс. навантаження 255 кг

Стропа підходить для повороту і утримання в положенні на боці: усуває небезпеку статичного утримання, забезпечуючи при цьому зручний доступ до шкіри пацієнта для очищення, обробки ран, оцінки та лікування. Допомогає при регулярній або частій зміні постільної білизни.

**Цілі використання:**

Поворот пацієнта / Гігієнічні процедури / Оцінка / Огляд шкіри / Перевертання / Побічні функціональні завдання / Терапевтичні вправи



**Функції**

Стропа для перевертання, використовується для перевертання пацієнта на бік, щоб уникнути зайвого навантаження на доглядальника.

Стропа дозволяє перевертати пацієнта з боку на бік, не знімаючи слінг з-під пацієнта. Вона може допомогти встановити загальну стропу без необхідності вручну повертати або іншим чином переміщати пацієнта. Поворотна стропа має відносно невелику поверхню, що полегшує огляд, догляд та лікування шкіри пацієнта.



**Поліестр**



Стандартний розмір	Великий розмір
28750	28751
Макс. навантаження	255 кг

**Поліпропілен (одноразова)**



Стандартний розмір	Великий розмір
287501	287511
Макс. навантаження	205 кг



Перегляд відео-інструкції



Active Micro



Active Micro Plus



Micro Plus  
одноразова



Active Trainer



Gait Trainer  
одноразова



Gait Trainer



Basic Basic



Basic Basic  
сітка



Basic Low



Basic Low  
сітка



Basic High



Basic High  
сітка



High  
одноразова



Basic Shell



Basic Comfort  
High



Basic Comfort  
High сітка



Comfort High  
одноразова



Sit-On II



Sit-On High II



Custom  
Amputee



Sit-On  
Comfort



Sit-On  
Comfort High



Sit-On Comfort  
High Hygiene



Active Vest  
дитяча



Basic Basic  
дитяча



Basic High  
дитяча



High дитяча  
одноразова



Sit-On II  
дитяча



Sit-On High II – дитяча

Sit-On Comfort – дитяча

Sit-On Comfort High – дитяча

Basic High – бариатрична

High одноразова бариатрична

Gait Trainer – бариатрична



Pannus Support

Стропа для переміщення бариатрична

Twin Turner – бариатрична

Стропа для ніг

Стропа для ніг одноразова II



Multi Support

Multi Support одноразова

OR Sling

OR Sling – одноразова



Стропа для переміщення

Стропа для позиціонування

Стропа для переміщення – Spacer

Стропа для переміщення одноразова



Стропа для переміщення – Tencel®

Turner

Twin Turner

Twin Turner II одноразова

